

“尼普洛” 塑膠注射針

“NIPRO” KATERAN NEEDLE

衛署醫器陸輸字第 000192 號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用。

產品敘述

1. 本產品由針管、針基及保護蓋構成，為用完即丟的注射針。
2. 本產品採用半透明彩色針基，於注射時血液迴血容易確認是否正確注入血管。
3. 單支無菌包裝。
4. γ -ray 滅菌。

本產品僅供單次使用，禁止二次使用。

注意事項

1. 請注意勿用手直接碰觸針管部位。
2. 切勿過度按壓針基。當接續時，勿以保護蓋過度旋轉針基〔針管以及針基有可能會破損〕。
3. 拉開保護蓋時，請注意勿碰觸針尖端〔保護蓋碰觸針時，尖刀處可能會變形，而造成穿刺困難的情況〕。
4. 注射針穿刺玻璃藥瓶及輸液容器等橡膠栓時，請注意務必在穿刺面上垂直刺入，並且橫向施力，切勿在同一部位穿刺。
5. 請注意勿讓注射針接觸到針劑包裝等藥液容器內部瓶身〔尖刀處可能會變形而造成穿刺困難的情況〕。
6. 請勿讓藥液及血液付著於接續部份〔可能會造成接續部鬆弛的情況發生〕。
7. 在蓋上保護蓋時，請注意誤刺及自保護蓋掉出的針等，謹慎行之。
8. 包裝破損、或污損時，若確認製品破損等異常時，請勿使用。
9. 在確認同時使用的醫藥品及醫療機器之隨同文件後，請遵照各別的使用方法⁰⁶及使用上注意事項來使用。
10. 請先行確認接續部無鬆脫後再行使用。請十分注意使用中本品的破損、接續部的鬆脫、藥液洩漏及阻塞等狀況。
11. 由於是塑膠製品，請注意低溫時的取用〔針管及針基有可能會破損〕。
12. 包裝開封後立即使用，並留意使用後感染防治，以安全的方法處理。

貯藏・保管方法以及使用期間等

1. 貯藏、保管方法注意勿被水弄濕、並避免保存在日光直射及高溫多濕的場所。
2. 有效期間・使用期限請參照外箱使用有效期限欄。



型號規格：100支/盒

規格	針基顏色	針鋒的角度	針的長度	
			60mm	70mm
			商品編號	商品編號
18G	粉紅色	R.B	—	02-002
		S.B	—	—
19G	奶油色	R.B	—	02-021
		S.B	—	—
20G	黃色	R.B	—	02-005
		S.B	—	—
21G	綠色	R.B	02-006	02-007
		S.B	—	—
22G	黑色	R.B	02-009	02-010
		S.B	02-016	02-017
23G	淡藍色	R.B	02-022	02-023
		S.B	02-024	—

※R.B-標準斜角 12° S.B-短斜角 18°

製造廠名稱：Manufactured by NIPRO(SHANGHAI) CO., LTD. 06
 製造廠地址：(NO. 2555 Bao An Road Malu Town Jiading,
 Shanghai, China) for NIPRO Corporation
 (3-9-3, Honjo-Nishi, Kita-Ku, Osaka-shi,
 Osaka, Japan)

藥商 名稱：華江醫療儀器股份有限公司
 藥商 地址：台南市尊南街 193 號

198

