

“尼普洛”靜脈留置針

“Nipro” Safelet Cath

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用

衛署醫器輸字第 019693 號

須由專業醫事人員操作使用

用途

本產品用於靜脈穿刺，亦可用於血管攝影時之血管穿刺(Seldinger technique)。

使用說明

1. 轉動保護套蓋以撕開標識上的分割線進行開封。
2. 取下保護套蓋，從保護蓋中筆直地抽出本產品。
3. 請確認排氣接頭完全嵌入到內針針座中。
4. 請確認內針與套管的位置組合正確。
5. 請將內針的刃面朝上（可通過標記進行確認），穿刺入已消毒的皮膚。
6. 套管前端進入血管內，可見血液回流。
7. 確認血液回流後，用手指固定住內針針座，將套管推進到所需深度。
8. 按住套管，拔出內針。
9. 套管留置後，將輸液器等與套管連接後，用膠布固定本產品。

禁忌

僅限單次使用。

警告及注意事項

1. 取出產品時，請筆直取出。如傾斜取出可能會傷到內針針尖。
2. 如套管長度超過內針針尖，請勿繼續使用。
3. 請捏住內針針座，並在穿刺時保持這一姿勢。如捏住其他部位，或沒有保持捏住內針針座進行穿刺，可能會因內針滑動而導致穿刺失敗。
4. 拔出內針時，請勿彎折套管，應筆直地拔出。拔出內針的過程中，如出現無法確保血管的情況，請將內針與套管一起拔出後廢棄。
5. 從套管里拔出的內針，請勿將內針再次插入套管內。另外，請勿使內針在套管內停留或前後移動。[可能會損傷套管內壁或內針刺穿套管，從而使破損套管的碎片進入患者體內。]
6. 請注意不要讓血液或藥液等附著在連接部。[可能會造成連接部鬆動等情況。]
7. 請勿用於高壓注射。[可能導致破損。]
8. 在使用過程中，應定期檢查確認本產品有無破損、連接部鬆動、漏液、空氣混入、堵塞等情況。
9. 請勿對套管和套管座的連接部施以過度的拉拽、擠壓、折曲等負荷。[可能導致套管發生脫落、破損、延伸等情況。]
10. 套管留置後，如出現因套管而引起的靜脈炎、血管外漏時，應停止使用。
11. 套管留置後，如固定不充分，有可能會導致漏液、意外脫落的現象，應定期檢查確認。

- 12.由於是塑膠材質製成，在搬運、操作過程中，應避免振動和衝擊。
- 13.將內針插入保護套時，需慎重進行注意誤穿刺，並應立即廢棄。[以防與未使用品混淆並被再次使用]。
- 14.保存時應注意不要沾水，並避免陽光直射、高溫和潮濕的環境。

滅菌方法：使用環氧乙烷滅菌。

規格

MODEL	CATHETER		NEEDLE
	GAUGE(mm)	LENGTH	GAUGE(mm)
NIC-14 x 2	14G(2.20mm)	2" (50mm)	16G(1.65mm)
NIC-16 x 2	16G(1.75mm)	2" (50mm)	18G(1.25mm)
NIC-16 x 2-1/2	16G(1.75mm)	2-1/2" (63mm)	18G(1.25mm)
NIC-18 x 2	18G(1.35mm)	2" (50mm)	20G(0.90mm)
NIC-18 x 1-1/4	18G(1.35mm)	1-1/4" (32mm)	20G(0.90mm)
NIC-20 x 2	20G(1.10mm)	2" (50mm)	22G(0.70mm)
NIC-20 x 1-1/4	20G(1.10mm)	1-1/4" (32mm)	22G(0.70mm)
NIC-22 x 1-1/4	22G(0.90mm)	1-1/4" (32mm)	24G(0.55mm)
NIC-22 x 1	22G(0.90mm)	1" (25mm)	24G(0.55mm)
NIC-24 x 1	24G(0.70mm)	1" (25mm)	26G(0.45mm)
NIC-24 x 3/4	24G(0.70mm)	3/4" (19mm)	26G(0.45mm)

包裝：1,000pcs／箱

製造業者名稱：NIPRO CORPORATION ODATE FACTORY

製造業者地址：8-7,Hanukiyachi,Niida,Odate-shi,Akita
018-5794,Japan.

醫療器材商名稱：華江醫療儀器股份有限公司
醫療器材商地址：臺南市南區新孝路197、199號