

尼普洛三方活栓 NIPRO STOPCOCK

使用說明

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用

衛部醫器輸字第037413號

須由專業醫事人員操作使用

[用途]


本裝置用作血管內輸液套的一部分，用於調節注入血管系統的溶液。
本裝置僅限單次使用。

[形狀、構造及原理]


1. 形狀、構造

(部件名稱)

(直插)

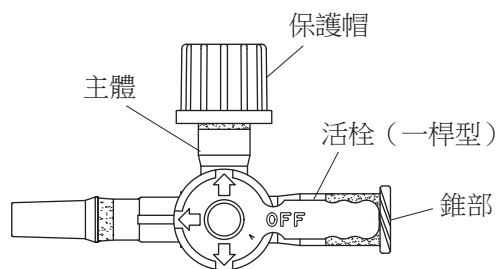

(螺旋)

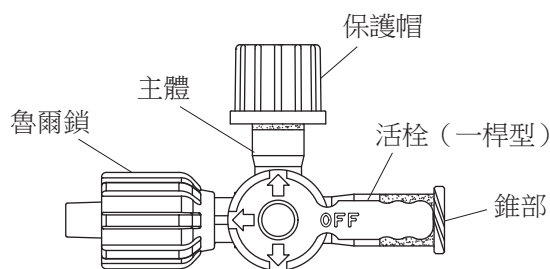

產品主體由聚碳酸酯製成

[操作程序或使用說明]

1. 在註有“PEEL”標識的部位打開產品包裝。
2. 抓住產品底部，然後將其自包裝中取出。
3. 將裝置牢固地連接到其他醫療器材。
4. 根據需要旋轉活栓以改變流向。

[操作程序相關的注意事項]

1. 請勿讓液體藥品等接觸連接部位。[連接處可能鬆動。]
2. 不要過度旋轉活栓。特別是使用一桿型時，請勿將活栓旋轉超過180°。[可能導致裝置破損。]

3.使用有針頭的針進行混合注射時，請注意針尖不要接觸或損壞錐部的內表面。[否則可能導致用於改變流向的關閉功能不起作用，或裝置連接到其他醫療器材時可能漏液。]

[禁忌]

請勿重複使用。

[操作時的注意事項]

1.重要的基本注意事項

- 1) 請勿使用本裝置進行血管攝影等高壓注射。[可能導致裝置破損。]
- 2) 使用過程中不斷監測裝置是否有破損、連接鬆脫、空氣混入、漏液及阻塞等。
- 3) 使用脂肪乳劑或含有脂肪乳劑的藥物、蓖麻油等油類或含有界面活性劑或酒精等增溶劑的藥物時，或使用含有酒精的消毒劑時，要格外小心裝置出現裂紋。[這些物質可能引起裝置破裂，導致洩漏、空氣混入等。特別是在給用全身麻醉劑、血管升壓藥、抗癌藥物或免疫抑制劑時，可能無法達到所需的體積，從而對患者產生嚴重的不良反應。在更換管路時如緊固過度或重新緊固可能會增加破裂的可能性。]
- 4) 如果發現裂紋，請立即更換新的裝置。
- 5) 與連接器連接時，請勿過度擰緊。[連接器可能無法斷開，或可能破裂，導致連接或空氣混入。]
- 6) 將注射器或連接器等所有裝置都牢固地連接至本產品，以免其鬆脫。此外，確認活栓是依液體流動方向操作。
- 7) 請勿沿著拔出方向對本裝置的活栓施加過大的力。[活栓可能會鬆動，導致液體洩漏。]
- 8) 從本裝置混合注射藥物時，謹防空氣混入。
- 9) 進行混合注射時，應考慮所注射的藥物並根據需要採取適當的措施（例如沖洗等）。[混合注射後，部分藥物可能會殘留在內，而不會立即流出。]

2. 異常狀況或不良事件

1)其他異常狀況

- (1)漏液
- (2)斷裂

[儲存說明及保存期間]

1. 儲存說明

避免暴露於水、陽光直射及高溫、潮濕的環境。

2. 有效期間(保存期限)

請參考外盒上之標示的保存期限。

製造業者名稱：Nipro Corporation Odate Factory

製造業者地址：8-7, Hanukiyachi, Niida, Odate-shi, Akita, 018-5794, Japan

醫療器材商名稱：華江醫療儀器股份有限公司

醫療器材商地址：臺南市南區彰南里新孝路197、199 號