

NIPRO

Safetouch Syringe®

With Safety Needle

Safetouch Syringe® 產品特色

- 有效的安全機制
- 單手便可啟動
- 注射技術只需極小的變化
- 喀噠聲表示安全裝置啟動
- 針可持續鎖定在安全裝置中
- 透明可視的安全機制
- 可輕易識別針頭規格(以針托顏色識別)



Safetouch Syringe® 使用說明

1. 打開部分包裝，自包裝膜中取出套管。
2. 確認安全注射針完整連接於本注射筒。
3. 消毒穿刺部位。
4. 拆去包裝，將針蓋打開並注入藥水至注射筒。
5. 將藥水注射至穿刺部位。
6. 使用完畢後，使用單手於平坦的表面施力，讓套管穩固的蓋上。
藉由聽到喀噠聲確認安全裝置已啟動，以避免針扎意外，立即將產品丟至可回收針尖物之回收容器內。

Safetouch Syringe®

With Safety Needle

產品規格：

capacity / needle size		LUER SLIP					LUER LOCK			
		1ML	3ML	5ML	10ML	20ML	3ML	5ML	10ML	20ML
20G	1/2" (13mm)						●			
	1" (25mm)		●	●			●	●	●	
	1-1/4" (32mm)			●			●	●	●	
	1-1/2" (38mm)			●			●	●	●	
21G	1/2" (13mm)				●	●			●	●
	5/8" (16mm)						●			
	1" (25mm)		●	●	●	●	●	●	●	●
	1-1/4" (32mm)			●	●	●	●	●	●	●
	1-1/2" (38mm)		●	●	●	●	●	●	●	●
22G	5/8" (16mm)						●			
	3/4" (19mm)		●				●			
	1" (25mm)		●	●	●	●	●	●	●	●
	1-1/4" (32mm)		●	●	●	●	●	●	●	●
	1-1/2" (38mm)			●	●	●	●	●	●	●
23G	5/8" (16mm)						●			
	3/4" (19mm)		●							
	1" (25mm)		●	●		●	●	●	●	●
	1-1/4" (32mm)		●	●	●	●	●	●	●	●
	1-1/2" (38mm)			●			●	●		
24G	1" (25mm)		●				●	●		
	1-1/4" (32mm)						●	●		
	1-1/2" (38mm)						●	●		
25G	5/8" (16mm)	●	●				●			
	1" (25mm)	●	●	●			●	●		
	1-1/2" (38mm)						●			
26G	3/8" (10mm)	●								
	1/2" (13mm)	●								
27G	1/2" (13mm)	●						●		

NIPRO

華江醫療儀器股份有限公司
Hua Chiang medical co., ltd

[台北公司]
地址: 台北市大安區羅斯福路三段245號4樓之2
電話: (02)2362-0396-7 傳真: (02)2362-0398
E-mail: taipei@huachiang.com

[台南公司]
地址: 台南市安平工業區新愛路23-1號
電話: (06)264-7878-0 傳真: (06)263-6966
E-mail: tainan@huachiang.com

Manufacturer site and address:
PT. Nipro Indonesia Jaya
Kawasan Industri Suryacipta, J.L. Surya Utama
Kav I 22B, 23 & 24, Desa Kutamekar, Kec.
Ciampel, Karawang, Jawa Barat, Indonesia